

IMPORTANTE

Por favor leia cuidadosamente e mantenha esta informação para uso futuro.

Faça exame em seus olhos regularmente e siga as instruções do oftalmologista quanto ao uso e manutenção correta de suas lentes. Por favor leia no Guia do Usuário importantes informações de segurança antes de usar suas lentes. Peça ao seu oftalmologista uma cópia do Guia do Usuário ou visite www.solotica.com.br.

ANTES DE COLOCAR A LENTE

Lave e seque bem as mãos antes de remover a lente de sua embalagem. Não deixe água da torneira ter contato com a lente.

ATENÇÃO: a higiene pessoal é muito importante.

INSERINDO A LENTE



Certifique-se de que a lente não está virada ao contrário.



Puxe para baixo a pálpebra inferior, empurre a pálpebra superior para cima e insira a lente suavemente sobre a córnea.

REMOVENDO A LENTE



Uma leve pressão sobre a pálpebra inferior enquanto se olha para cima tenderá a mover a lente para baixo.



A lente então poderá ser retirada do olho usando-se o dedo e o indicador.

LIMPEZA DA LENTE

Antes de usar e após remover a lente dos olhos sempre enxágue a lente com a solução de limpeza sugerida pelo seu oftalmologista. Após usar as lentes, armazene-as num estojo cheio com solução de limpeza fresca. Se você não usa as lentes frequentemente troque a solução de limpeza uma vez por semana.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Lembre-se de fazer check-ups regulares e sempre siga a orientação de seu oftalmologista. Não empreste suas lentes para ninguém, elas são para seu uso exclusivo. Siga a recomendação de uso e substituição das lentes como prescrita pelo seu oftalmologista. Se você experimentar desconforto, lacrimejamento excessivo, mudanças na visão ou vermelhidão imediatamente remova suas lentes e prontamente entre em contato com seu oftalmologista. Estas instruções não dão a você toda informação que você precisa sobre o uso de lentes de contato. É muito importante consultar seu oftalmologista e seguir sua prescrição.